



Mitteilung des Zentrallabors

Betreff: Aufgrund von Lieferschwierigkeiten mit der 7.5 ml Lithium-Heparin Gel-Monovette kann z.Zt. von Sarstedt nur Lithium-Heparin Monovetten **ohne Trenngel** geliefert werden.

Problem: Da diese Monovetten nach Zentrifugation keine Diffusionsbarriere zwischen Plasma und Blutkuchen bilden, verändert sich die Konzentration der meisten Analyte bei längerer Lagerung.

Maßnahme: Aus diesem Grund müssen wir Nachforderungen - bis zum Ende der Lieferprobleme - aus Lithium-Heparin-Plasma auf maximal 6 Stunden beschränken. In Einzelfällen (z.B. bei pädiatrischen Proben in Sondergefäßen) kann eine Nachforderung im Labor telefonisch erfolgen.

Nachforderungen aus anderen Materialien sind nicht betroffen.
Wir bitten um Verständnis.

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

06-02-2024