

## Das Zentrallabor informiert

Liebe Kollegen,

wir möchten Sie darüber informieren, dass am **1. August 2023** die Leitlinien-konforme (siehe Praxisempfehlungen der DDG, 2022) **Umstellung der Glucose-Monovetten für alle endokrinologischen Funktionstests (inkl. den oralen Glucosetoleranztests)** stattfindet. Für die Funktionstests werden die bekannten Fluorid (gelbe Kappe) - und Serum-Monovetten für die Glucose-Messung durch die GlucoEXACT Monovetten (graue Kappe) der Firma Sarstedt ersetzt. Da das in unserem Klinikum gebräuchliche Blutabnahme-System ebenfalls von der Firma Sarstedt stammt, sind in dieser Hinsicht keine Besonderheiten zu beachten. Zudem bleiben für Blutabnahmen außerhalb von Funktionstesten die Standard-Fluorid-Monovetten im Einsatz. Die herkömmlichen Fluorid-Monovetten (gelbe Kappe) haben nämlich die Vorteile, dass man nicht auf korrekten Füllstand achten muss, zudem Kindermonovetten verfügbar sind und aus ihnen Laktat bestimmbar ist.

**Wichtig:** Für eine Reihe von Funktionstests, für die früher die Abnahme von einer Serum-Monovette pro Zeitpunkt ausreichte, müssen in Zukunft 2 Monovetten (GlucoExact und Serum-Monovette) abgenommen werden.

**Bitte beachten Sie unbedingt für die Abnahme der Glucose im Rahmen endokrinologischer Funktionstests (inkl. oGTTs) folgende Hinweise:**



1. GlucoEXACT Monovetten (graue Kappe) müssen, wie von Gerinnungsmonovetten bekannt, vollständig gefüllt werden, da ein korrektes Mischverhältnis von Blut und in der Monovette vorgelegter Lösung eingehalten werden muss. Bei Blutabnahmen mit Butterfly muss unbedingt vorab eine andere Monovette abgenommen werden, um den anhängenden Schlauch vor Abnahme der GlucoEXACT Monovetten vollständig zu füllen.
2. Der Füllstand wird im Labor durch Wiege der Monovetten mithilfe unseres automatisierten Straßen-Systems geprüft. Signifikant unterfüllte Monovetten werden nicht vermessen.
3. Bitte lokalisieren Sie vor Aufkleben des Barcode-Etiketts die Markierung für die einzuhaltende Füllhöhe (kleiner schwarzer Strich neben der Aufschrift GlucoEXACT). Markierung nicht überkleben!
4. Die GlucoEXACT Monovetten können über das SAP-System unter der Nummer 51853663 bestellt werden. Sollten auf Ihrer Station / in ihrer Poliklinik noch keine GlucoEXACT Monovetten verfügbar sein, können Sie sich Monovetten im Zentrallabor abholen.

5. GlucoEXACT Monovetten sind für die Laktat-Bestimmung ungeeignet!

Wir möchten Sie bitten, **am Montag (31.07.), wenn irgendmöglich, auf Funktionstest-Anforderungen zu verzichten** und ansonsten den geplanten Test unter Tel. 2121 anzumelden. Ab dem 01.08. möchten wir Sie bitten, **nur aktuell angelegte Anforderungen** (ab dem 01.08.) und deren ausgedruckte Etiketten zu verwenden!

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Zentrallabor