

WARTUNGSPLAN

für Blutgas-, Oxymetrie-, Elektrolyt- und Metabolitsysteme

MERKE: Dieser Wartungsplan umfasst Geräte der Serie ABL7xx und 8xx

Nur die Wartungsverfahren durchführen und unten als erledigt markieren, die für Ihr(en) System/Analysator relevant sind

Monat: Jahr:

Tägliche Wartung:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lösungsstand kontrollieren																															
Einlassdichtung überprüfen/säubern																															
Einlassklappe überprüfen/säubern																															
Thermopapiervorrat kontrollieren																															
CO ₂ -Druck kontrollieren																															
Qualitätskontrolle durchgeführt?																															
QC nachfüllen																															
QC Grafik-Kontrolle																															

Monatliche Wartung:

O ₂ -Elektrode membr. (aller 3 Mon)																															
CO ₂ -Elektrode membr. (aller 3 Mon)																															
Ref-Elektrode membranieren(monatlich)																															
Elektrolytelektroden memb. (aller 3 Mon)																															
Glucose-Elektrode memb. (monatlich)																															
Lactat-Elektrode memb. (monatlich)																															
Einlassdichtung reinigen/erneuern																															
Luftfilter säubern/erneuern																															

Zusätzliche Wartung:

Proteinentfernung durchführen(wöchentl.)																															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartung durchgeführt von:																															
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ABL™ ist ein Warenzeichen von Radiometer Medical ApS, Dänemark. ABL ist in den USA registriert.
 Radiometer Medical ApS. Kopenhagen, Dänemark. 1996. Alle Rechte vorbehalten.