



# Information aus der Apotheke

## Umstellung auf Quantiferon-Plus Single Patient Pack (Luer/Sarstedt Adapter)

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der unzufrieden stellenden Handhabbarkeit der bisherigen Quantiferon Plus Single Patient Packs, werden Sie ab sofort unter der SAP-Nr.: **53511965** Quantiferon-Plus Sets erhalten, die bereits alle notwendigen Adapter zur Blutentnahme mittels Sarstedt Butterfly enthalten. Der Sarstedt Butterfly muss weiterhin von der Station zur Verfügung gestellt werden.

**Wichtig** ist es zu beachten, dass vor der Befüllung der Quantiferon Röhren der Schlauch des Butterflys bereits mit Blut befüllt sein muss. Dieses sogenannte Priming des Butterflys ist durch Befüllung einer normalen Blutabnahme-Monovette zu erreichen.

Die dem Quantiferon-Set beiliegenden Adapter müssen entsprechend der Packungsbeilage zusammen gefügt werden. Nun kann die Befüllung der Quantiferon Röhren mittels Vacutainer erfolgen.

Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen unter Tel.: 5053 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Apothekenteam