

Checkliste SentiSurv RLP App: Erfassung eines Tests

Liebe Teilnehmende,

herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an SentiSurv RLP!

Um Ihnen den Einstieg in die SentiSurv RLP App zu erleichtern, finden Sie im Folgenden eine kurze Übersicht zur Testung.


Während der Installation: Benachrichtigungen und Kameranutzung

Während der Installation werden Sie gebeten, Benachrichtigungen und Kameranutzung zu erlauben. Die Benachrichtigungen erinnern Sie **mittwochs** an die regelmäßige Testung. Die Kameranutzung dient dem Aufnehmen des Testergebnisses.

Wählen Sie „Zulassen“
um erinnert zu werden



Wählen Sie „Bei Nutzung der App“ um
Fotos vom Testergebnis zu machen

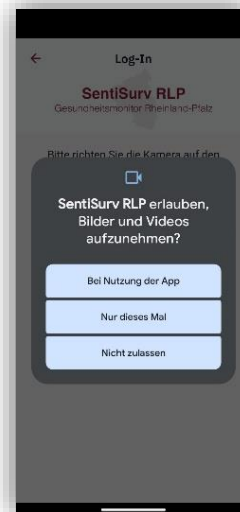


Sollten Sie keine Benachrichtigungen bekommen oder keine Bilder aufnehmen können, prüfen Sie bitte in Ihren **Einstellungen**, ob Sie der App die Berechtigung dazu erteilt haben und ob Sie die aktuellste Version der App verwenden.

Im Notfall können Sie die App auch jederzeit **neu installieren**.


Regelmäßige Testung: mittwochs

Falls Sie dies erlaubt haben, sendet Ihnen die App jeden Mittwoch eine Benachrichtigung und erinnert Sie an die Testung. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über den Ablauf.

Öffnen Sie die
SentiSurv RLP App

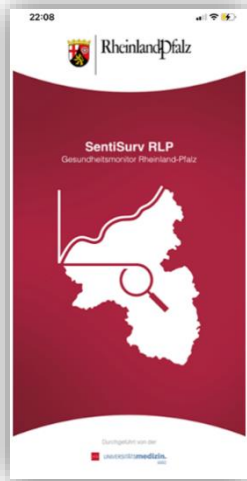


Klicken Sie auf den Bereich
„Regelmäßiger Schnelltest“

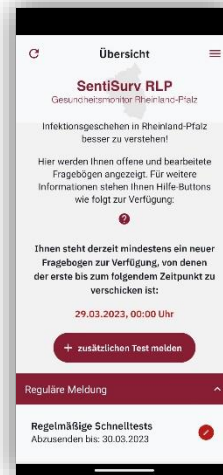


Ggf. müssen Sie
zunächst auf den
roten Balken
„Reguläre Meldung“
klicken, um den
Bereich
„Regelmäßiger
Schnelltest“
anzuzeigen.


Sie sind nun im
Testmenü

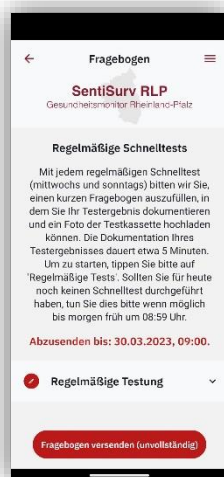

Klicken Sie auf den Bereich
„Regelmäßige Testung“

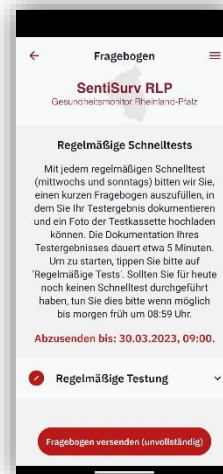

Die App leitet Sie nun
durch den Test

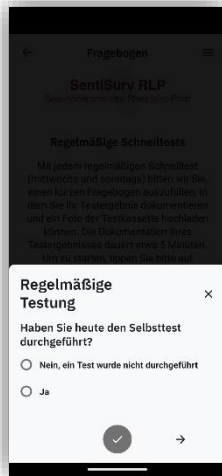

Die App bittet Sie, ein
Foto zu machen




Bewerten Sie die
Qualität des Fotos



Nach Beantwortung aller Fragen
drücken Sie den **grünen Button**

Sollte der Test bzw. das
Testergebnis nicht gut
zu sehen sein, können
Sie das Foto mit dem
roten Button erneut
aufnehmen. Sind Sie
zufrieden, nutzen Sie
den grünen Button oder
den Pfeil nach rechts.

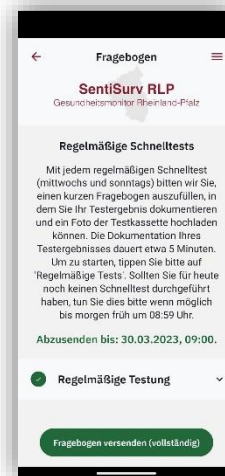

Sie haben die Testung damit erfolgreich abgeschlossen. Die App zeigt Ihnen
nun bereits das Datum des **nächsten** regelmäßigen Tests an.


Sollten Sie an anderen Tagen, aus privaten oder beruflichen Gründen, einen
Schnelltest oder PCR-Test gemacht haben, können Sie diesen als **zusätzlichen
Test** erfassen. Die Anleitung dazu finden Sie auf der nächsten Seite.

Zusätzliche Testung


Sollten Sie an anderen Tagen als mittwochs aus privaten oder beruflichen Gründen einen Schnelltest oder PCR-Test gemacht haben, können Sie diesen als **zusätzlichen Test** erfassen.

Sollten Sie einmal einen regelmäßigen Test falsch eingetragen haben, können Sie ebenfalls einen zusätzlichen Test mit den richtigen Ergebnissen melden. Im Gegensatz zum regelmäßigen Test werden Sie **nicht** nach einem Foto gefragt.


Öffnen Sie die
SentiSurv RLP App

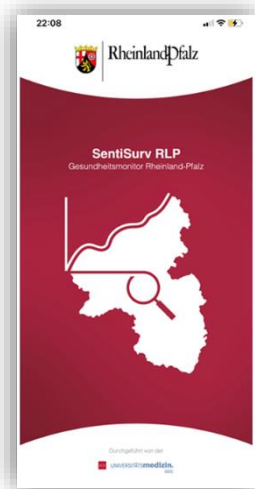


Wählen Sie den roten Button
„+ zusätzlichen Test melden“

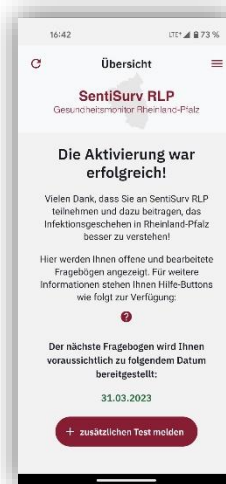

Bestätigen Sie mit „Ja“

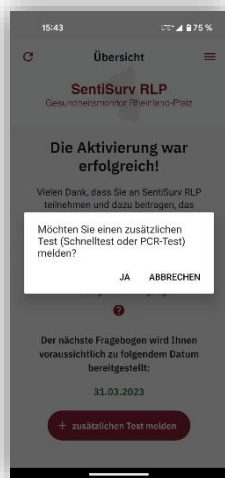

Die App informiert Sie über
den neuen Fragebogen

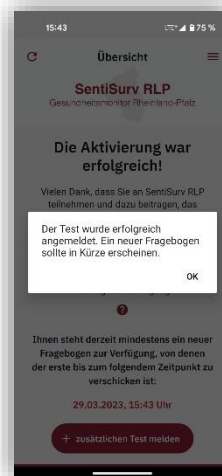

Ihr zusätzlicher Test
steht bereit



Falls der Bereich
„Zusätzliche
Meldung“ nicht
sofort angezeigt
wird, drücken Sie
auf den **Refresh-
Button** (runder Pfeil
oben links), um die
Seite zu
aktualisieren.

Verfahren Sie ab
hier wie beim
regelmäßigen Test,
indem Sie die
Fragen
beantworten und
den Fragebogen am
Ende versenden.

Sie werden bei
einem zusätzlichen
Test nicht nach
einem Foto gefragt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

? Ich erhalte keine Benachrichtigungen.

! Bitte prüfen Sie, ob Sie der App die Berechtigungen erteilt haben und ob Ihre App auf dem aktuellsten Stand ist

? Ich habe meinen regelmäßigen oder zusätzlichen Test falsch oder unvollständig abgesendet.

! Sie können das korrekte Ergebnis ganz einfach als zusätzlichen Test melden.

? Ich habe versehentlich einen zusätzlichen Test geöffnet.

! Sie können uns den versehentlich geöffneten, Test als „unvollständig“ zusenden. Ein zusätzlicher Hinweis an uns ist nicht notwendig.

? Ich sehe den regelmäßigen Test nicht.

! Ggf. müssen Sie bei kleineren Bildschirmen zunächst nach unten scrollen oder auf den roten Balken „Reguläre Meldung“ klicken.